

- Информация об установке программного обеспечения


### Доступ к ознакомлению с ПО «Система нейросетевая Архимед Ivory AI»:

- <https://reg.ris.fishbirds.ru/>
- Логин: doctor\_test
- Пароль: poqw091

ПО «Система нейросетевая Ivory AI» (далее – Система Ivory) не предназначена для широкого круга пользователей, которые используют в своей работе информационные технологии.

Установка Система Ivory в качестве самостоятельного ПО или же интеграция с другими информационными системами медицинской организации (в том числе сторонних производителей) производится только инженерами поставщика в зависимости от выбранной схемы работы. Доступ к исходным установочным файлам у заказчика отсутствует.

Запуск Системы Ivory осуществляется из окна анализа и просмотра изображений. Для этого откройте исследование, подходящей модальности и диагностируемой области исследования (РГ ОГК или РГ пазух носа). Далее, нажмите на кнопку «AI» в нижней правой части интерфейса программы:

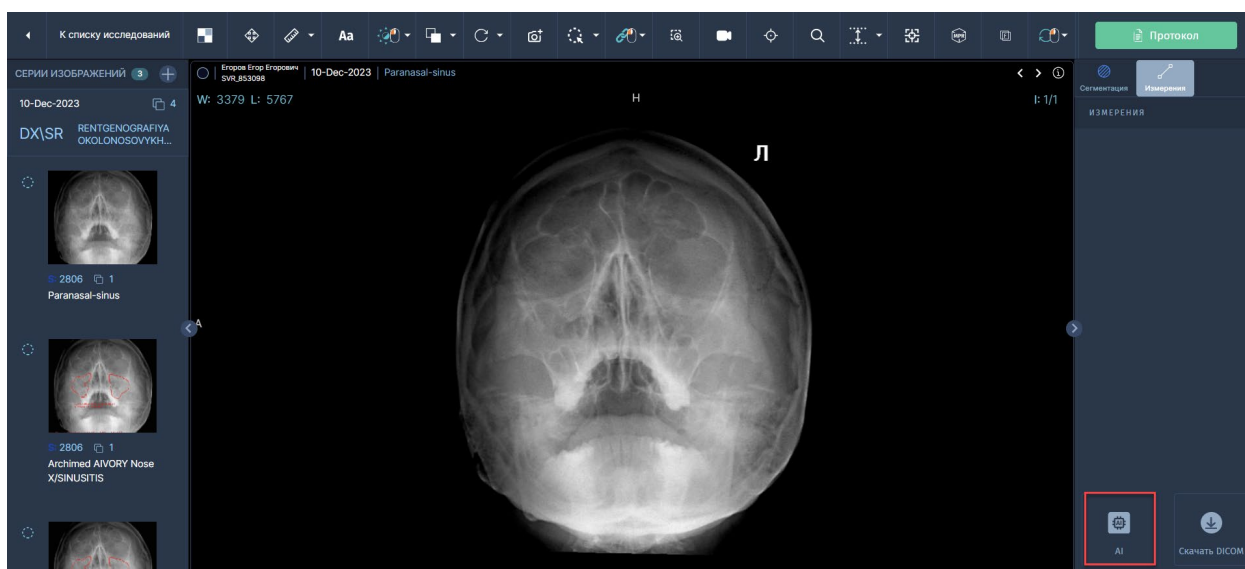

Система Ivory представляет собой платформу, состоящую из медицинского ПО для хранения, просмотра, протоколирования диагностических исследований и модулей, действие которых основано на применении алгоритмов искусственного интеллекта. Состав модулей ИИ зависит от

варианта исполнения ПО. Область применения: Поддержка принятия врачебных решений, анализ патологий на медицинских изображениях различных модальностей с применением сверхточных нейронных сетей.

Система Aivory предназначена для повышения эффективности диагностических подразделений, автоматизации рутинных измерений, вычисления объемов, детекции патологий. Результаты работы представляется в виде:

- создания дополнительной серии, с выделением цветным контуром органа или патологии;
- сегментированного изображения;
- отчета в формате DICOM SR с заключением.

ПО предназначено для самостоятельного использования в виде отдельных модулей или в составе комплексной платформы.